



MLD

Medizinische Laboratorien Düsseldorf

Anleitung zur Handhabung der Urin-Monovette®

Bildquelle: Sarstedt




Barcode-Etikett exakt senkrecht entlang der Linie kleben. Stopfen entfernen und für später beiseite legen.




Die Saugspitze aufsetzen.



Die Saugspitze ins mit Urin gefüllte Gefäß eintauchen und die Urin-Monovette bis zum Anschlag nach hinten aufziehen bis die Kolbenstange hörbar einrastet.

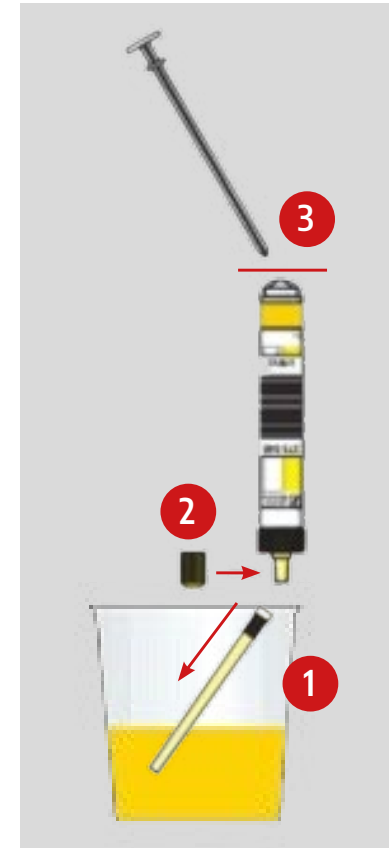

Die Saugspitze abnehmen und im Gefäß belassen. Im zweiten Schritt den Stopfen auf die Urin-Monovette setzen. Im letzten Schritt die Kolbenstange abknicken. Saugspitze und Kolbenstange entsorgen.

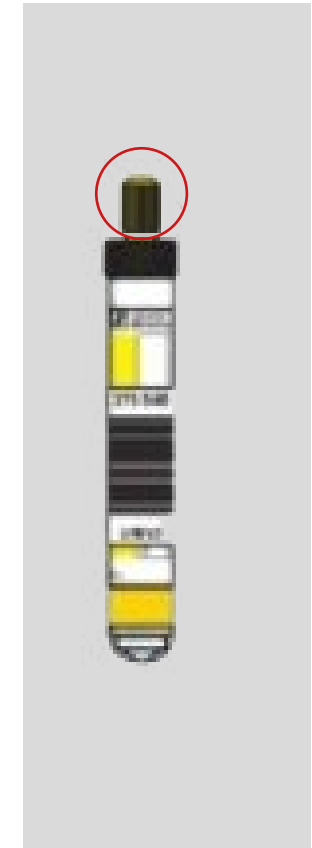

Die fertige, mit Kappe verschlossene Urin-Monovette ins Labor schicken.